

Viên đạn đặt trực tràng Repaherb - Hướng dẫn sử dụng



Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng vì tờ hướng dẫn sử dụng chứa các thông tin quan trọng cho người dùng. Sản phẩm này là một thiết bị y tế được dùng cho người lớn, và cần được sử dụng theo đúng hướng dẫn nhằm đạt hiệu quả tối đa.

Giữ lại tờ hướng dẫn sử dụng. Bạn có thể cần phải xem lại nó.

Thành phần

Sucralfate, bơ ca cao, lanolin (nguồn gốc thực vật), Witepsol W25 (chất nền của viên đạn), chiết xuất cúc xu xi (calendula-extract), chiết xuất cúc La Mã (chamomile extract), chiết xuất lá cây Phi (witch hazel leaf extract).

Dạng của thiết bị y tế

Viên đạn đặt trực tràng. Mỗi hộp chứa 10 viên đạn, mỗi viên có khối lượng 2,5 g.

Viên đạn đặt trực tràng Repaherb là gì và được dùng để làm gì?

Viên đạn đặt trực tràng Repaherb được dùng để điều trị các triệu chứng của bệnh trĩ và các biến chứng của nó (ví dụ: eczema, nứt trực tràng). Nó bao phủ và bảo vệ lớp biểu bì, chăm sóc cho da bị viêm, ngứa, giúp thúc đẩy tái tạo da. Viên đạn đặt trực tràng Repaherb làm giảm sự khô da, nhờ đó giúp làm lành vết thương, làm giảm nguy cơ nứt và tổn thương khi đi đại tiện.

Khi nào bạn nên tránh dùng viên đạn đặt trực tràng Repaherb?

Không sử dụng nếu bạn quá mẫn cảm với lanolin hoặc bất kỳ thành phần nào khác của sản phẩm này. Không dùng cho bệnh nhân trĩ xuất huyết.

Phụ nữ có thai và cho con bú

Việc sử dụng viên đạn đặt trực tràng Repaherb trong thời gian có thai và cho con bú không phải là chống chỉ định, nhưng khuyến cáo nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trong những trường hợp này.

Tương tác với các chế phẩm khác

Chưa quan sát thấy tương tác giữa viên đạn đặt trực tràng Repaherb với các chế phẩm khác, do đó nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi sử dụng sản phẩm này cùng với các chế phẩm khác dùng cho trực tràng.

Sử dụng đồng thời viên đạn đặt trực tràng với bao cao su có thể làm giảm độ an toàn của việc tránh thai.


Sử dụng viên đạn đặt trực tràng Repaherb như thế nào?

Luôn luôn sử dụng sản phẩm theo đúng hướng dẫn trong tờ Hướng dẫn sử dụng.

Khi sử dụng theo cách khác với mô tả trong Hướng dẫn sử dụng, có thể không cải thiện được các triệu chứng bệnh, hoặc có thể gây kích ứng.

Rửa tay trước khi sử dụng viên đạn đặt trực tràng Repaherb.

Liều khuyến cáo như sau: Cho 1 viên đạn Repaherb vào trong trực tràng, sau khi đã vệ sinh sạch sẽ vùng hậu môn, một hoặc hai lần mỗi ngày.

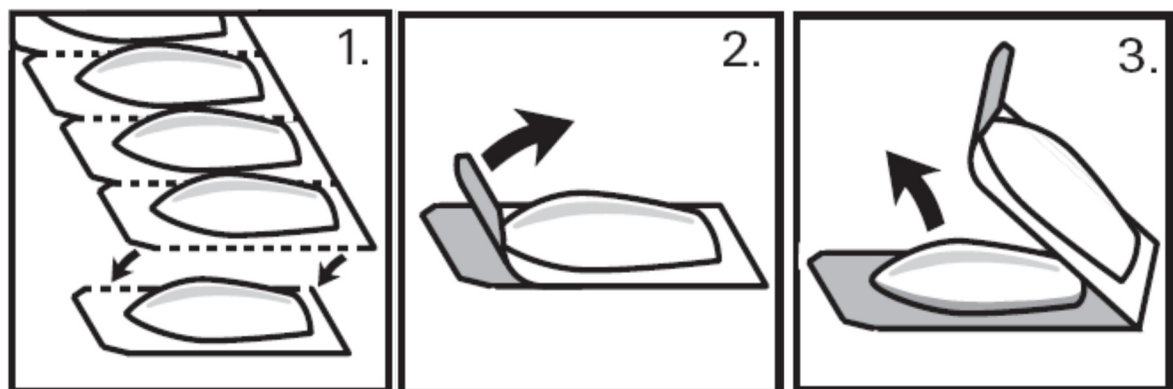

Mỗi vỉ có chứa các dải đựng viên đạn, được phân chia bằng các vạch đứt.



Trước khi sử dụng, kiểm tra để chắc chắn rằng bao gói sản phẩm còn nguyên vẹn, và sản phẩm không bị hỏng. Không sử dụng viên đạn nếu bao gói sản phẩm bị hư hỏng.

Xé một dải đựng viên đạn từ vỉ theo vạch đứt (Hình 1). Caren thận bóc dải đựng viên đạn bắt đầu từ phía trên cùng được đánh dấu bằng một mũi tên (Hình 2.). Lấy viên đạn ra khỏi dải (Hình 3).

Luôn luôn rửa tay sau khi dùng viên đạn đặt trực tràng.

Không để sản phẩm tiếp xúc với mắt và xung quanh mắt, miệng và niêm mạc miệng. Nếu sản phẩm bị dính vào các vùng trên của cơ thể, hãy lau hoặc rửa sạch.

Viên đạn đặt trực tràng có thể làm bẩn quần lót, do đó bạn nên sử dụng băng vệ sinh hoặc tã lót.

Thời gian sử dụng phụ thuộc vào sự cải thiện của các triệu chứng, nhưng có thể sử dụng sản phẩm 4 tuần liên tục.

Tham khảo ý kiến bác sĩ nếu các triệu chứng không cải thiện trong vòng 1-2 tuần.

Tác dụng phụ

Việc sử dụng các chế phẩm tác dụng tại chỗ - đặc biệt khi dùng kéo dài - có thể dẫn tới các phản ứng quá mẫn, các triệu chứng bao gồm cảm giác bỏng rát, ngứa, đau, ban đỏ. Nếu bạn gặp phải các triệu chứng này khi sử dụng sản phẩm, ngưng điều trị và tham khảo ý kiến bác sĩ.

Nếu bạn gặp phải bất kỳ phản ứng phụ nào khác chưa được liệt kê trong tờ Hướng dẫn sử dụng, hãy hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.

Cảnh báo

Để xa tầm nhìn và tầm với của trẻ em! Tránh tiếp xúc với mắt! Không được nuốt sản phẩm!
Không được sử dụng viên đạn đặt trực tràng Repaherb trong âm đạo.

Hạn dùng và điều kiện bảo quản

Hạn dùng được ghi trên vỏ hộp và vỉ chứa viên đạn.

Không dùng sản phẩm sau ngày hết hạn. Ngày hết hạn là ngày cuối cùng của tháng đó.



Bảo quản viên đạn đặt trực tràng Repaherb ở nhiệt độ không quá 25°C.



Tránh ánh sáng.

Không vứt bỏ bất kỳ thiết bị y tế nào vào nước thải hoặc rác thải hộ gia đình. Tham khảo ý kiến dược sỹ cách hủy bỏ sản phẩm khi không còn sử dụng. Những biện pháp này sẽ giúp bảo vệ môi trường.

Tờ hướng dẫn sử dụng này được cập nhật vào: Tháng 3 năm 2017

Thiết bị y tế



2409



Nhà sản xuất: Egis Pharmaceuticals PLC

Trụ sở: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38., Hungary

Nhà máy: 9900 Körmend, Mátyás király u. 65., Hungary

Chú thích các biểu tượng trên bao bì

	Thận trọng! Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
	Các hướng dẫn tham khảo khi sử dụng
	Không dùng nếu bao gói sản phẩm không còn nguyên vẹn
	Giới hạn nhiệt độ
	Tránh ánh sáng
	Nhà sản xuất
	Số lô sản xuất
	Hạn dùng